

# Simulador de RCP EVE

---



# Perfil



EVE de Hivista es una herramienta de entrenamiento auxiliar para RCP que se puede operar solo con las dos manos. Cumple con las normas de medidas de tratamiento de emergencia para pacientes con paro cardíaco. Tiene un metrónomo integrado, voz, luz indicadora e información en pantalla para retroalimentar los datos de entrenamiento en tiempo real. Todas las personas comunes pueden practicar RCP en el hogar, la oficina, la escuela, el centro de capacitación, etc., en cualquier momento y en cualquier lugar de acuerdo con la guía de las indicaciones de voz o los datos gráficos, sin necesidad de un instructor para guiar al lado. Con el programa de puntuación inteligente, los usuarios pueden obtener una puntuación de finalmente. Cuanto mayor sea el puntaje que obtuvimos, más efectivas fueron las medidas de RCP.


# Embalaje



1 x Caja de embalaje



1 x Dispositivo de RCP

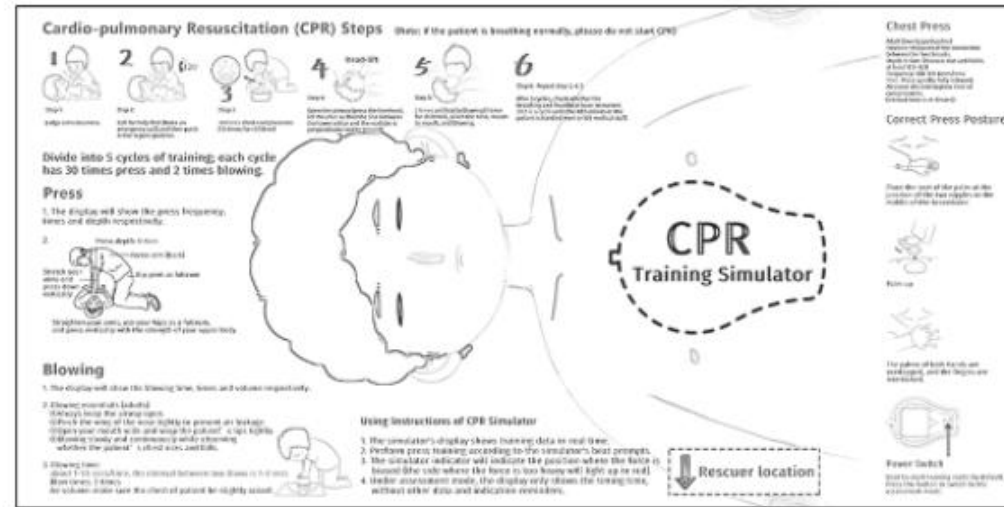

1 x Tapete de operación



2 x Boquilla de soplado

**Nota:** Para transportarlo sin riesgo, el paquete no contiene baterías, prepare las baterías usted mismo.

Tubo de soplado


Espuma

Metrónomo

Pantalla LED


el altavoz

Cambio de modo  
/Calibración

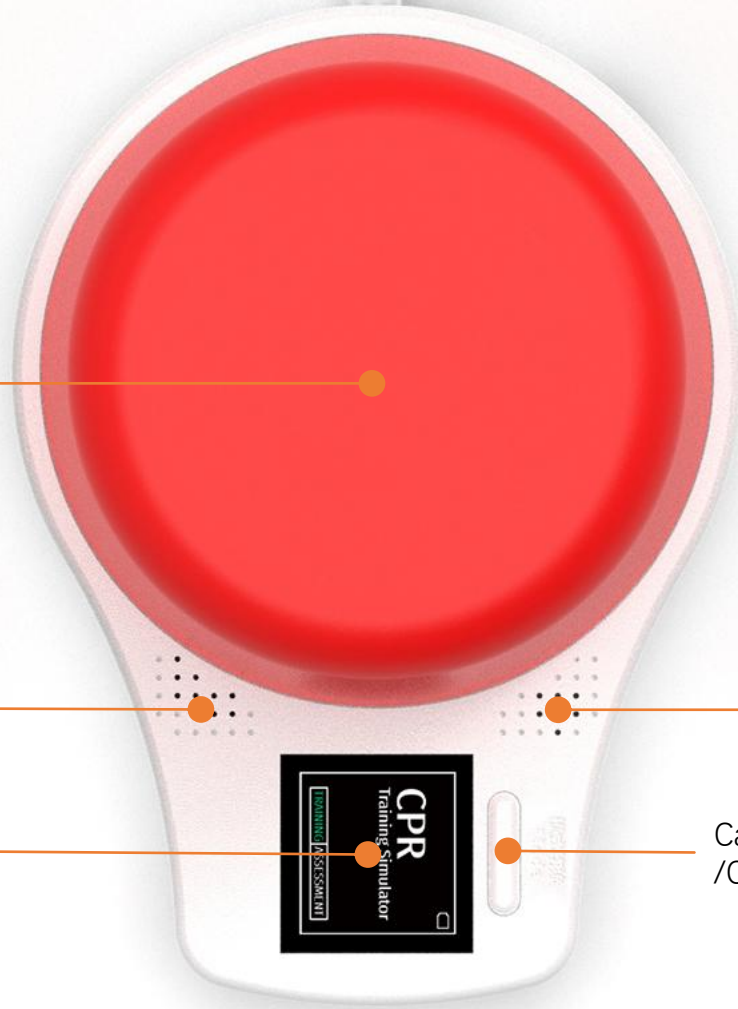

Battery

Power On/Off

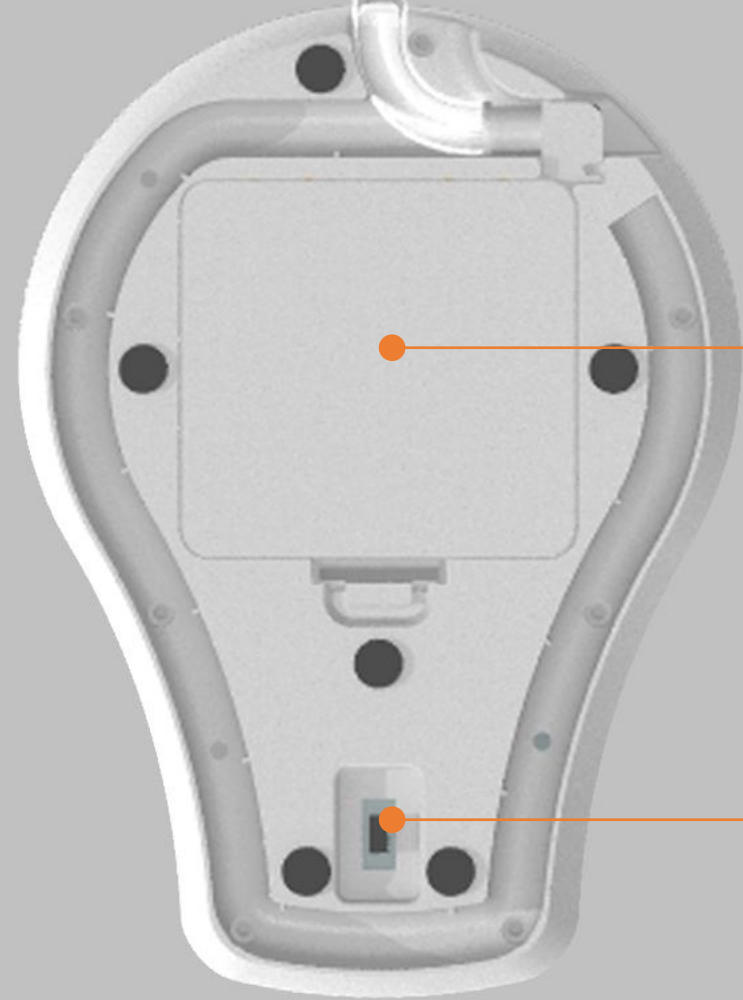

# Funciones



# Características





## Tamaño portátil, fácil de llevar

EVE puede guardarse en una bolsa y llevarse consigo a cualquier lugar gracias a su diseño ligero y compacto. El peso es de solo 330 g.




---

## Experiencia de compresión real.

---

- EVE utiliza espuma de poliuretano segura, un material que proporciona una resistencia muy similar a la del pecho humano, lo que hace que el aprendizaje sea más real y preciso.



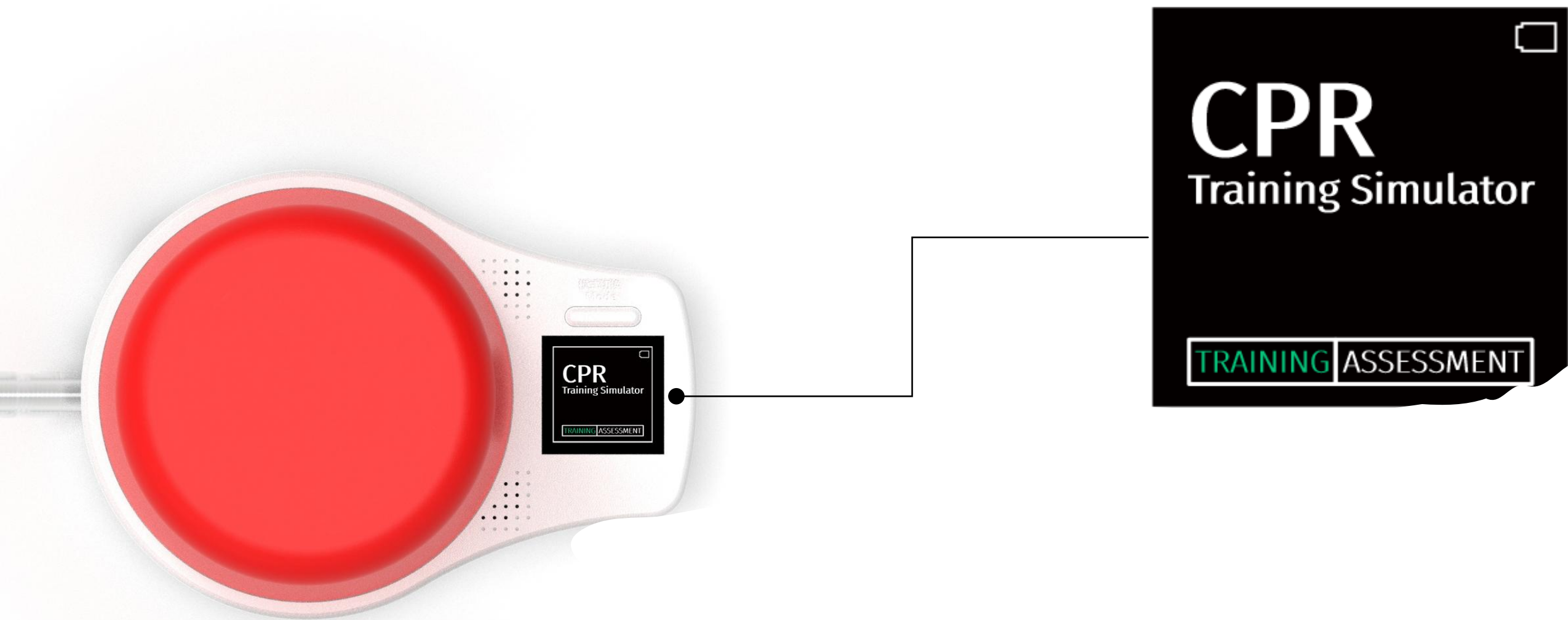


## Modo de formación / evaluación


Se pueden cambiar libremente dos modos de entrenamiento y evaluación



# En modo de entrenamiento

- Su sensor de alta precisión incorporado detecta automáticamente la frecuencia de compresión, la intensidad, la desviación de dirección, el volumen de soplado y el tiempo de soplado.
- Sonido de aviso de metrónomo para frecuencia de compresión y guía de aviso de voz de corrección de errores inteligente.
- Visualización gráfica de datos de entrenamiento en tiempo real en pantalla LED.

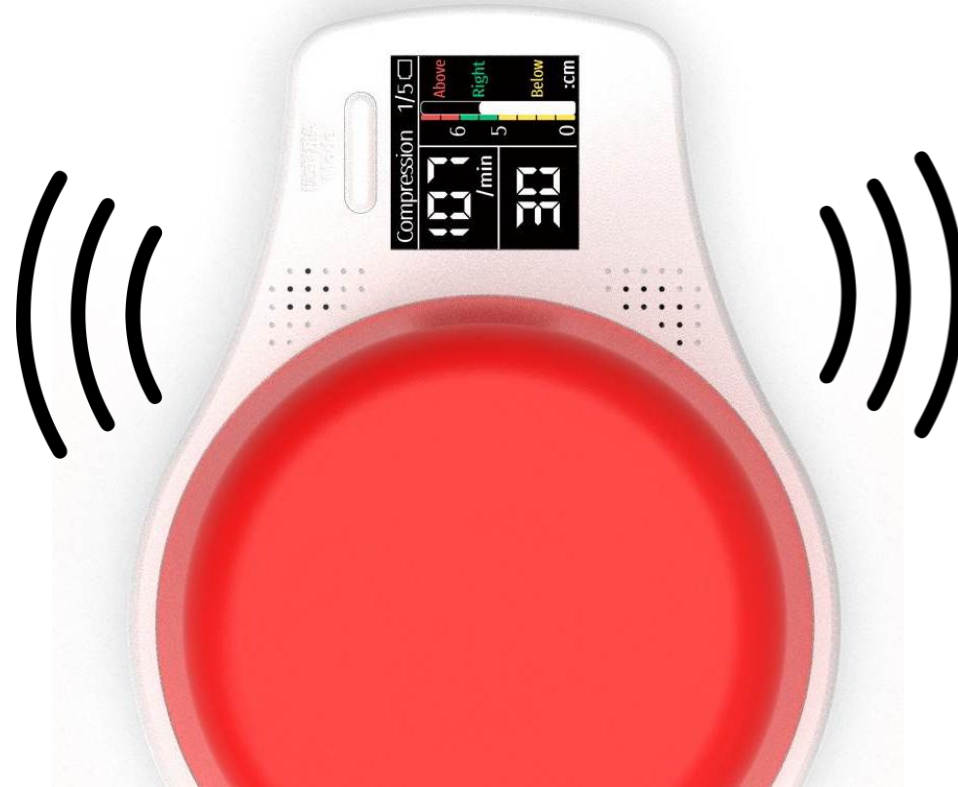

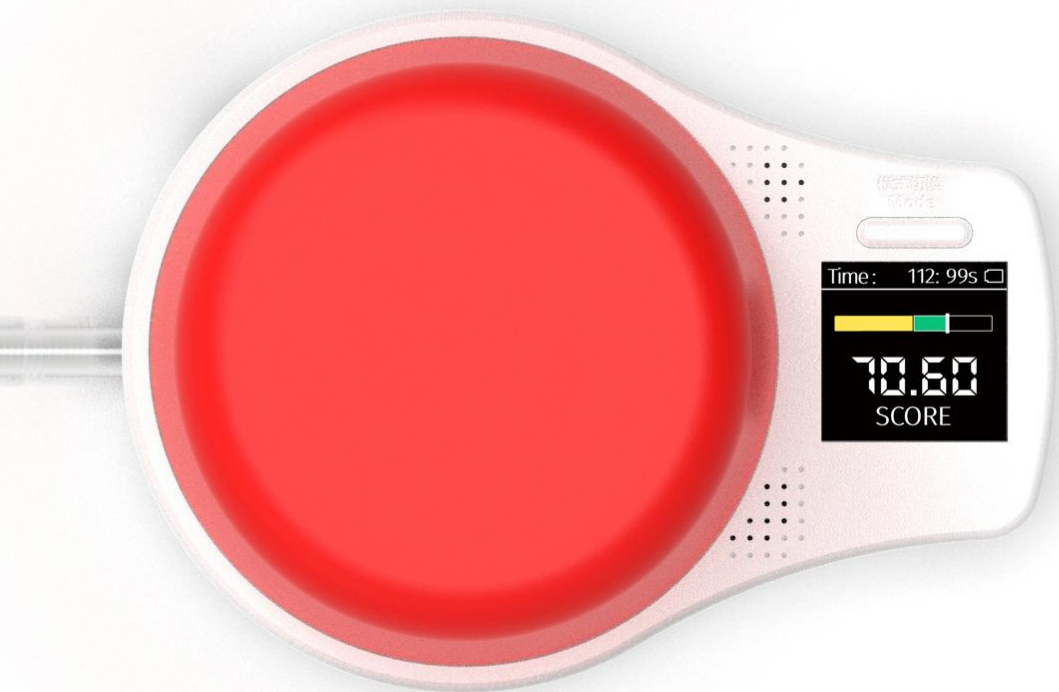

# Programa de puntuación automático incorporado

- Cumplir con las normas de medidas de tratamiento para pacientes con paro cardíaco.
- (Compresión de 30 + soplo de 2) / Grupo, 5 grupos en total.
- Deduzca automáticamente la puntuación si tiene una operación incorrecta, la frecuencia de compresión, la intensidad, la desviación de dirección, el volumen de soplado y el tiempo de soplado.
- Cuanto más alta sea la puntuación, más eficaz será la RCP.

# Especificaciones

Artículo	Parámetros
Modelo del Producto	EVE, EVE-B(Versión de Bluetooth)
Contenidos de formación	Habilidad de primeros auxilios (CPR)
Mensaje de voz	sí
Profundidad de compresión	0-6CM
Nivel de fuerza de compresión	0-32KG
Volumen de soplado	0-600ml (la precisión de detección esis 5ml)
Fuente de alimentación	AA Batería x 4pcs
El consumo de energía	0.13W (0.12W para el modo de espera)
Tamaño de pantalla del panel	26.5 x 25.5mm
Peso neto	330g
Peso bruto	565g
Tamaño del producto	120(W) x 164(L) x 132(H)mm
Tamaño de embalaje	14 x 14 x 17cm
Temperatura de trabajo	0-60C°
Temperatura de almacenamiento	-20-60 C°
Lenguaje de apoyo	Inglés, chino



# Aplicaciones

- Es adecuado para la facultad de medicina, el departamento de emergencias del gobierno, el centro de capacitación de habilidades de EMS, etc. El grupo de usuarios es muy amplio, puede ser utilizado por todas las personas y familias comunes. Para aprender RCP, para salvar la vida de las personas cuando ocurrió un accidente.





# Contacta con nosotras

---

- Dirección: 2 / F, Mu Building, Design Industry Park, No.3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen City, 518052, Guangdong Province, China.
- Contacto: Nina Ni
- Mail: [market@hivista-optic.com](mailto:market@hivista-optic.com)
- Móvil: 0086 15914116193 (Whatsapp)
- Skype: indesign.co

